

# Таблица дозировки

для **Sekusept® aktiv**

1 мерная ложка = 30 мл

150 мл порошка = 100 г

Объём рабочего раствора*	Концентрация рабочего раствора					
	0,3%	0,4%	0,5%	0,75%	1%	2%
1 литр	4,5 мл	6 мл	7,5 мл	11,25 мл	15 мл	30 мл
2 литра	9 мл	12 мл	15 мл	22,5 мл	30 мл	60 мл
4 литра	18 мл	24 мл	30 мл	45 мл	60 мл	120 мл
8 литров	36 мл	48 мл	60 мл	90 мл	120 мл	240 мл
10 литров	45 мл	60 мл	75 мл	112,5 мл	150 мл	300 мл
20 литров	90 мл	120 мл	150 мл	225 мл	300 мл	600 мл

\* Объём рабочего раствора = вода (мл) + порошок (мл)

## Инструкция по применению:

Наполните ёмкость необходимым количеством воды.

Добавьте соответствующее количество порошка.

Несколько раз перемешайте раствор. Раствор готов к применению через 15 минут.

**Готовьте свежий раствор ежедневно!**

The logo for ECOLAB, featuring the word "ECOLAB" in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the letters "O" and "L" is a stylized blue starburst or sunburst icon.