


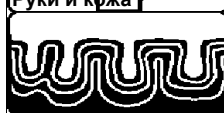


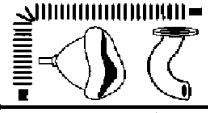
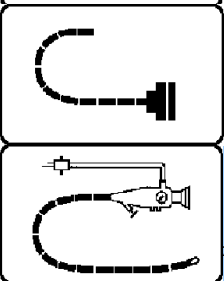
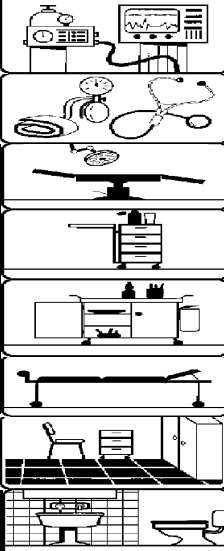
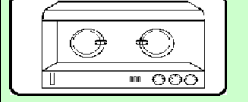


## ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИИ

Область применения	Применение	Использование	Препарат	Концентрация, экспозиция	Лица, проводящие дезинфекцию
<b>Руки и кожа</b>					
	Мытье рук и кожи	Во всех случаях перед гигиенической и хирургической дезинфекцией рук.	Манисофт	концентрат	Весь персонал
	Гигиеническая дезинфекция	Перед началом работы и при необходимости	Скинман софт, Спитадерм	3мл - 30 сек	Весь персонал
 Руки и кожа	Хирургическая дезинфекция рук	Перед хирургическими операциями.	Скинман софт, Спитадерм	2 x 5мл по 2,5 мин	Операционный персонал
	Обработка операционного поля	Перед хирургическими операциями.	Спитадерм	стерильными марлевыми тампонами, смоченными средством <b>2 раза по 1 мин</b>	Операционный персонал
	Обработка инъекционного поля	Перед манипуляциями	Спитадерм	стерильными ватными тампонами, смоченными средством <b>1 раз по 1 мин</b>	Врачи, медицинские сестры
	Уход	При необходимости	Силонда	<b>готовый лосьон, многократно</b>	Весь персонал
<b>Инструменты</b> (ИМН из резины, пластмассы, металлов, стекла, включая хирургические, анестезиологические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, реанимационный инвентарь. (Кроме эндоскопов))	Дезинфекция	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15 мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	Предстерилизационная очистка	Проводят после дезинфекции, погружая в рабочий раствор средства в соответствии с режимом, затем ополаскивают питьевой водой.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 1мин, Секусепт Актив 0,4% - 10мин, Секусепт Актив 0,5% - 15мин, Секусепт Актив 0,75% - 15 мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	Дезинфекция, совмещенная с ПСО	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	ДВУ и Стерилизация	Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной водой. Отмыв осуществляется в течение 3мин при полном погружении изделий в воду.	Секусепт Актив	<b>ДВУ:</b> Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин <b>Стерилизация:</b> Секусепт Актив 1% - 120мин, Секусепт Актив 2% - 90мин	Операционный персонал, медицинские сестры
<b>Эндоскопы</b> твердые, гибкие и инструменты к ним	Предварительная очистка	После использования. Загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива удаляют марлевой салфеткой, смоченной в растворе. Каналы эндоскопа промывают водой согласно инструкции производителя эндоскопа.	Секусепт Актив	Секусепт Актив 0,5%	Медицинские сестры
	Дезинфекция	После предварительной очистки. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Актив	Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин	Медицинские сестры
	Предстерилизационная очистка	Проводят после дезинфекции, погружая в рабочий раствор средства в соответствии с режимом. Инструментальный канал очищают специальной щеткой (2мин.), внутренние каналы при помощи шприца или электроотсоса (3мин.), наружную поверхность марлевой салфеткой (1мин.). Ополаскивание производят проточной водой –1 мин.	Секусепт Актив	Секусепт Актив 0,5% - 15мин	Медицинские сестры

	<p><b>Дезинфекция, совмещенная с ПСО</b></p>	<p>После предварительной очистки. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима. Инструментальный канал очищают специальной щеткой (2мин.), внутренние каналы при помощи шприца или электроотсоса (3мин.), наружную поверхность марлевой салфеткой (1мин.). Извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.</p>	<p><b>Секусепт Актив</b></p>	<p>Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин</p>	<p>Медицинские сестры</p>
<p><b>Эндоскопы твердые, гибкие и инструменты к ним</b></p>	<p><b>ДВУ и Стерилизация</b></p>	<p>Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной водой. Отмыв осуществляется в течение 3мин при полном погружении изделий в воду.</p>	<p><b>Секусепт Актив</b></p>	<p><b>ДВУ:</b> Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин <b>Стерилизация:</b> Секусепт Актив 1% - 120мин, Секусепт Актив 2% - 90мин</p>	<p>Медицинские сестры</p>
<p><b>Поверхности (медицинская аппаратура, тонометры, операционные столы, столы для инструментария, стоматологические кресла, манипуляционные столы, кюветы, кушетки, общие поверхности, санитарно-техническое оборудование)</b></p>	<p><b>Дезинфекция небольших и труднодоступных поверхностей путем распыления</b></p>	<p>Ежедневно и при необходимости: поверхности в помещениях, предметы обстановки равномерно оросить средством до полного смачивания при норме расхода 30 мл/м<sup>2</sup> поверхности.</p>	<p><b>Инцидин Ликвид</b></p>	<p><b>Бактерии:</b> Инцидин Ликвид - 5 мин <b>Вирусы и туберкулез:</b> Инцидин Ликвид - 15 мин</p>	<p>Медицинские сестры, санитары</p>
	 <p><b>Дезинфекция профилактическая, текущая, заключительная поверхностей в помещениях, предметов обстановки и ухода за больными, приборов, ИМН, аппаратов (включая кюветы), санитарно-технического оборудования. Для проведения генеральных уборок.</b></p>	<p>Ежедневно и при необходимости: обеззараживаемые поверхности протирают ветошью, смоченной раствором средства при норме расхода 100 мл/м<sup>2</sup> - 150 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от препарата). Санитарно-техническое оборудование чистят щеткой или ершом, смоченным раствором средства. Инцидин Экстра Н - не требует смыва.</p>	<p><b>Инцидин Экстра Н, Секусепт Пульвер</b></p>	<p><b>Бактерии:</b> Инцидин Экстра Н 0,25% - 240 мин Инцидин Экстра Н 0,5% - 60 мин Инцидин Экстра Н 1,0% - 30 мин Секусепт Пульвер 1,5% - 60 мин Секусепт Пульвер 2% - 30 мин Секусепт Пульвер 3% - 15 мин <b>Вирусы и туберкулез:</b> Инцидин Экстра Н 1,5% - 240 мин Секусепт Пульвер 2% - 120 мин Секусепт Пульвер 5% - 120 мин</p>	<p>Медицинские сестры, санитары</p>

**ECOLAB®**

ЗАО ЭКОЛАБ  
Россия, 109147, Москва  
Марксистская, 3, стр. 1  
Бизнес-центр "Планета"  
тел.: +7-495 980 7060  
факс: +7-495 980 7069  
www.ecolab.com  
www.ecolabhealthcare.ru