




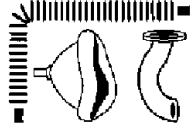

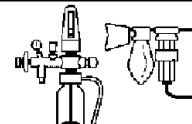




О П Е Р А Ц И О Н Н А Я					
Область применения	Применение	Использование	Препарат	Концентрация, экспозиция	Лица, проводящие дезинфекцию
<b>Руки и кожа</b>					
	Мытье рук и кожи	Во всех случаях перед гигиенической и хирургической дезинфекцией рук.	Манисофт	концентрат	Весь персонал
	Гигиеническая дезинфекция	Перед началом работы и при необходимости.	Скинман софт, Спитадерм	3мл - 30 сек	Весь персонал
	Хирургическая дезинфекция рук	Перед хирургическими операциями.	Скинман софт, Спитадерм	2 x 5мл по 2,5 мин	Операционный персонал
	Обработка операционного поля	Перед хирургическими операциями.	Спитадерм	стерильными марлевыми тампонами, смоченными средством 2 раза по 1 мин	Операционный персонал
	Уход	При необходимости.	Силонда	готовый лосьон, многократно	Весь персонал
<b>Инструменты (ИМН из резины, пластмассы, металлов, стекла, включая хирургические и анестезиологические инструменты. (Кроме эндоскопов))</b>					
	Дезинфекция	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15 мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	Предстерилизационная очистка	Проводят после дезинфекции, погружая в рабочий раствор средства в соответствии с режимом, затем ополаскивают питьевой водой.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 1мин, Секусепт Актив 0,4% - 10мин, Секусепт Актив 0,5% - 15мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	Дезинфекция, совмещенная с ПСО	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	ДВУ и Стерилизация	Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной водой. Отмыв осуществляется в течение 3мин при полном погружении изделий в воду.	Секусепт Актив	ДВУ: Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин Стерилизация: Секусепт Актив 1% - 120мин, Секусепт Актив 2% - 90мин	Операционный персонал, медицинские сестры
<b>Поверхности (операционный стол, медицинская аппаратура, общие поверхности)</b>					
	Дезинфекция небольших и труднодоступных поверхностей путем распыления.	Ежедневно и при необходимости: поверхности в помещениях, предметы обстановки равномерно оросить средством до полного смачивания при норме расхода 30 мл/м2 поверхности.	Инцидин Ликвид	Бактерии: Инцидин Ликвид - 5 мин Вирусы и туберкулез Инцидин Ликвид - 15 мин	Операционный персонал, медицинские сестры
	Дезинфекция профилактическая, текущая, заключительная поверхностей в помещениях, предметов обстановки и ухода за больными, приборов, ИМН, аппаратов. Для проведения генеральных уборок.	Ежедневно и при необходимости: обеззараживаемые поверхности протирают ветошью, смоченной раствором средства при норме расхода 100 мл/м2. Не требует смыва.	Инцидин Экстра Н	Бактерии: Инцидин Экстра Н 0,25% - 240 мин Инцидин Экстра Н 0,5% - 60 мин Инцидин Экстра Н 1,0% - 30 мин Вирусы и туберкулез Инцидин Экстра Н 1,5% - 240 мин	Операционный персонал, медицинские сестры
