

ОБЩИЙ СТАЦИОНАР					
Область применения	Применение	Использование	Препарат	Концентрация, экспозиция	Лица, проводящие дезинфекцию
Руки и кожа					
	Мытье рук и кожи	Во всех случаях перед гигиенической и хирургической дезинфекцией рук.	Манисофт	концентрат	Весь персонал
	Гигиеническая дезинфекция	Перед началом работы и при необходимости	Скинман софт, Спитадерм	3мл - 30 сек	Весь персонал
	Обработка инъекционного поля	Перед манипуляциями	Спитадерм	стерильными ватными тампонами, смоченными средством 1 раз по 1 мин	Врачи, медицинские сестры
	Уход	При необходимости	Силонда	готовый лосьон, многократно	Весь персонал
Инструменты (ИМН из резины, пластмассы, металлов, стекла, включая хирургические инструменты. (Кроме эндоскопов))					
	Дезинфекция	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15 мин	Медицинские сестры
	Предстерилизационная очистка	Проводят после дезинфекции, погружая в рабочий раствор средства в соответствии с режимом, затем ополаскивают питьевой водой.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 1мин, Секусепт Актив 0,4% - 10мин, Секусепт Актив 0,5% - 15мин	Медицинские сестры
	Дезинфекция, совмещенная с ПСО	После использования. Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин.	Секусепт Пульвер, Секусепт Актив	Секусепт Пульвер 2% - 120мин, Секусепт Актив 1% - 60мин, Секусепт Актив 2% - 15мин	Медицинские сестры
	ДВУ и Стерилизация	Погружают в раствор, выдерживают в растворе в соответствии со временем, выбранного режима, извлекают из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной водой. Отмыв осуществляется в течение 3мин при полном погружении изделий в воду.	Секусепт Актив	ДВУ: Секусепт Актив 1% - 30мин, Секусепт Актив 2% - 5мин Стерилизация: Секусепт Актив 1% - 120мин, Секусепт Актив 2% - 90мин	Медицинские сестры
Поверхности (медицинская аппаратура, тонометры, кушетки, общие поверхности).					
	Дезинфекция небольших и труднодоступных поверхностей путем распыления.	Ежедневно и при необходимости: поверхности в помещениях, предметы обстановки равномерно оросить средством до полного смачивания при норме расхода 30 мл/м ² поверхности.	Инцидин Ликвид	Бактерии: Инцидин Ликвид - 5 мин Вирусы и туберкулез: Инцидин Ликвид - 15 мин	Медицинские сестры, санитары
	Дезинфекция профилактическая, текущая, заключительная поверхностей в помещениях, предметов обстановки и ухода за больными, приборов, ИМН, аппаратов, санитарно-технического оборудования. Для проведения генеральных уборок.	Ежедневно и при необходимости: обеззараживаемые поверхности протирают ветошью, смоченной раствором средства при норме расхода 100 мл/м ² . Санитарно-техническое оборудование чистят щеткой или ершом, смоченным раствором средства. Не требует смыва.	Инцидин Экстра Н	Бактерии: Инцидин Экстра Н 0,25% - 240 мин Инцидин Экстра Н 0,5% - 60 мин Инцидин Экстра Н 1,0% - 30 мин Вирусы и туберкулез: Инцидин Экстра Н 1,5% - 240 мин	Медицинские сестры, санитары